


# Sada na uzatváranie rán bez šitia

## NÁVOD NA POUŽITIE



01 Ruky si vydezinfikujte alkoholovými prípravkami. Nasadte si nitrilové rukavice.

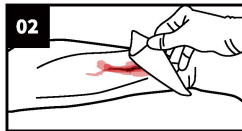


02 Ranu vyčistite a vydezinfikujte antiseptickými prípravkami s Benzalkonium Chloride (BZK).




03 Očistite a osušte okolie rany a udržiavajte okraje čisté (v prípade potreby opäť dezinfikujte).



04 Otvorte balenie.

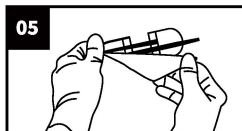

05 Vyberte pásky na uzavretie rany. Odstráňte podkladovú fóliu.

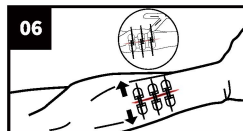

06 Rovnomerne ju priložte a jemne ťahajte plastové pásky, kým sa rana neuzavrie. Odstrihnite dlhšie pásky.

Vznik pooperačného edému môže spôsobiť rozrezanie kože, tvorbu pľuzgierov na koži alebo stratu priľnavosti pásky na oboch koncoch netkanej pásky. Ak sa tak stane, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Pred aplikáciou sa uistite, že pacient nie je citlivý alebo alergický na adhezívne produkty.

# NEODPORÚČA SA POUŽÍVAŤ ADHÉZIU V NASLEDUJÚCICH PRÍPADOCH:

Potenciálne faktory nevhodnosti adhézie sú:

- A)** Prítomnosť exsudátu, kožných olejov, vlhkosti, vlasov, silne zvráskavenej kože alebo nad telesnými kĺbmi  
**B)** Silne alergická pokožka   **C)** Infikované rany   **D)** Rana alebo tržné poranenie je príliš veľké   **E)** Kritický stav pacienta

## Upozornenie:

**Sada na uzatvorenie rán bez šitia nenahrádza zastavenie masívneho krvácania!**

**Vtedy je potrebné navštíviť lekára alebo privolať rýchlu zdravotnícku pomoc!**

## VLASTNOSTI:

- Žiadne sekundárne poškodenie, úspora času a úsilia po ošetrení, nie je potrebné odstraňovať stehy a po zahojení sa ľahko odstráni
- Bez obmedzenia tvarom a veľkosťou rany
- Nie je potrebná anestézia; nezasahuje do kože, zmierňuje bolesť
- Má rôzne špecifikácie a možno ho kombinovať na použitie podľa stavu rany
- Umožňuje neinvazívny, otvorený, zúžený rez so zníženým počtom švov stehov
- S viacerými obrátenými zubami možno výrobok použiť na rany s edémom
- Štyri stabilné pásky na vytvorenie rovnobežnej siete
- Pomáha znižovať riziko infekcie rany
- Jednoduché čistenie rany, aplikácia, úspora času a úsilia

Predaj, servis a zákaznícka podpora:

SELVIT, spol. s r.o.; Tichá ulica 8560/15A, 010 01 Žilina

mobil: 0903 891 006; email: [medical@selvit.sk](mailto:medical@selvit.sk); [eshop.selvit.sk](http://eshop.selvit.sk)